


**일 시** : 2022년 10월 11일  
**수 신** : 병(의)원의 진단검사의학과 실장님  
**발 신** : (주)바이오시스템즈 한국지사 고객지원부  
**제 목** : Biochemistry Calibrator, Controls 제품의 New Value 제공

1. 저희 바이오시스템즈 제품을 사용해주시는 각 병(의)원 실장님들께 감사의 말씀을 드립니다.
2. 저희 바이오시스템즈 한국지사에서는 자사 장비 및 시약을 사용하는 기관에 보다 정확하고 정밀한 검사 결과를 제공하고자, 대한임상정도관리협회에서 시행하는 외부정도관리 결과 및 질병관리청에서 시행하는 검사 항목별 표준화 사업의 참여 결과를 분석하여 바이오시스템즈 스페인 본사로 공유해 오고 있습니다.
3. 바이오시스템즈 스페인 본사에서는 한국으로부터 보고받은 분석 결과를 참고하여 Biochemistry 전체 항목에 대한 Trueness 검증을 수행하였으며, 일부 검사 항목 **AST/GOT, CALCIUM, CK** 에서의 편차가 확인되었습니다. 이에 따라 보정된 Calibration, Controls 의 New Value 를 제공하여 바이오시스템즈 시약 검사에서의 분석 결과의 정확성을 높이고자 합니다.  
※ 편차의 정도는 임상 진단에 영향을 끼치지 않음으로 보고된 환자 검사 결과에 대한 별도 지원은 필요하지 않습니다.
4. 저희 바이오시스템즈 고객지원부에서는 수신된 **Calibrator, Controls 의 New Value 를 원격 지원을 통하여 제공**하고자 하오니, 검사실에서는 사용하시는 Calibrator 와 Control 의 제품(Code) 및 바이알 로트(Vial Lots) 정보를 아래의 내용에서 확인하시어, 지원이 필요하신 경우 고객지원부 (031-790-1956, 1942)로 연락하시어 원격지원을 받으시길 부탁드립니다.

| Code  | Kit Format | Description                           | Vial lots     |
|-------|------------|---------------------------------------|---------------|
| 18044 | 5x5 mL     | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN         | 125, 126, 127 |
| 18011 | 5x5 mL     | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR               | 74, 75        |
| 18042 | 5x5 mL     | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN)  | 35, 38, 39    |
| 18009 | 5x5 mL     | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I          | 100           |
| 18043 | 5x5 mL     | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUAMN) | 32, 33        |
| 18010 | 5x5 mL     | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II         | 89, 90        |

5. 아울러 본 건에 대한 원격 지원의 누락을 방지하고자 시약 Box 외관에 '주의' 안내 스티커가 부착되어 출고되니, 스티커 확인 시 고객지원부 (031-790-1956, 1942)로 연락하시어 자세한 확인을 받으시길 부탁드립니다.

◇ Biochemistry Serum(혈청)

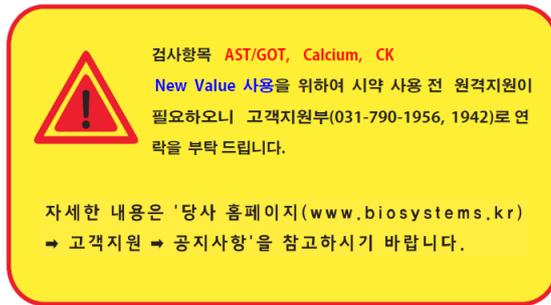

(주)바이오시스템즈 한국지사  
고객지원부