

일 시 : 2024년 04월 16일
수 신 : 병(의)원 진단검사의학과 실장님
발 신 : (주)바이오시스템즈 한국지사 고객지원부
제 목 : Ax5 CRP-hs 검사 시약 Test Parameter 변경 안내의 건

1. 저희 바이오시스템즈 제품을 사용해주시는 각 병(의)원 실장님들께 감사의 말씀을 드립니다.
2. 자사 A15, A25 C-Reactive Protein-hs (CRP-hs) 검사 시약이 사용자 편의성 및 간섭 영향 향상을 위하여 User Software 내 New Test Parameter 가 적용될 예정입니다. 변경이 필요한 제품은 CRP-hs (Code 13927)의 Lot. 57317 부터 적용되며, 변경 사항을 아래와 같이 전달하여 드리오니 검사에 참고 부탁드립니다.

3. Ax5 Parameter 변경 사항 요약

Procedure	변경 전	변경 후
	CRP-hs (Code 13927)	
시약 준비	RA, RB 시약 혼합 필요	별도의 준비과정 불필요
시약소모량(RA)	300 μ l	240 μ l
시약소모량(RB)		60 μ l
측정범위(LoD ~ LoL)	0.15 ~ 15 mg/L	0.27 ~ 15 mg/L
간섭 (Interference)	Bilirubin, Triglycerides, RF 에 대한 간섭영향 기존 대비 2 배 이상 향상	

4. 변경된 CRP-hs 시약의 Box 외관에 '주의' 안내 스티커가 부착되어 출고되며, 사용 전 Software 상 설정변경이 필요하니 고객지원부 (T. 031-8011-2354)로 연락을 부탁드립니다.



5. 본 건과 관련하여 더 궁금하신 사항은 고객지원부(T.031-8011-2354)로 연락을 부탁드립니다.

(주)바이오시스템즈 한국지사
고객지원부